

Algoritmo de productos Coloplast

PIEL EN RIESGO		OBJETIVO	NIVEL EXUDADO	PROFUNDIDAD	TRATAMIENTO PREFERENTE	TRATAMIENTO ALTERNATIVO
		Proteger		<u>No profunda</u>	 Comfeel® Plus Transparent	 Comfeel® Plus
INDICACIONES SEGÚN TIPO DE TEJIDO		OBJETIVO	NIVEL EXUDADO	PROFUNDIDAD	TRATAMIENTO PREFERENTE	TRATAMIENTO ALTERNATIVO
Heridas crónicas: - UPP - Úlcera de pie diabético - Úlceras vasculares	Necrótico 	1 Hidratar 2 Desbridamiento autolítico		<u>Superficial</u>	 Purilon® + Biatain® Silicone	 Purilon® + Comfeel® Plus Transparent
	Esfacelos 	1 Desbridamiento autolítico 2 Rellenar los espacios muertos 3 Gestión del exudado	 <hr/>	<u>- de 2cm*</u> <hr/> <u>+ de 2cm</u>	 Biatain® Silicone + Biatain® Fiber	 Biatain® + Biatain® Alginate
Herida Agudas: - Quemaduras - Traumáticas - Quirúrgicas	Granulación 	1 Gestión del exudado 2 Proteger el tejido de granulación		<u>- de 2cm*</u>	 Biatain® Silicone	 Biatain®
	Epitelización 	1 Proteger el tejido recién formado 2 Mantener las condiciones óptimas de temperatura y humedad	 <hr/>	<u>- de 2cm*</u>	 Comfeel® Plus Transparent	 Comfeel® Plus
PRESENCIA DE SIGNOS DE INFECCIÓN		OBJETIVO	NIVEL EXUDADO	PROFUNDIDAD	TRATAMIENTO PREFERENTE	TRATAMIENTO ALTERNATIVO
		1 Manejar la carga bacteriana 2 Rellenar los espacios muertos 3 Gestión del exudado	 <hr/>	<u>- de 2cm*</u> <hr/> <u>+ de 2cm</u>	 Biatain® Silicone Ag + Biatain® Alginate Ag	 Biatain® Ag + Biatain® Alginate Ag

*Los apósitos de Coloplast con Tecnología 3DFit se conforman al lecho de la herida hasta 2cm de profundidad; por tanto, no es necesario el uso de apósitos de relleno en estas heridas (exceptuando el caso de heridas tunelizadas y cavitadas)

Para más información sobre cómo valorar una herida con el Triángulo de Evaluación de Heridas escanee este código QR con la cámara de su móvil



- Apósito primario
- Apósito secundario

Ostomy Care / Continence Care / Wound & Skin Care / Urology Care

Coloplast Productos Médicos, S.A. Condesa de Venadito, 5, 4ª Planta - 28027 Madrid, España
www.coloplast.es. Coloplast es una marca registrada de Coloplast A/S. © Ref: 460NOD5896 - 05/2020.
 Todos los derechos reservados por Coloplast A/S
 Conoce nuestro blog www.menosdiasconheridas.com

Productos de Cuidado de Heridas Coloplast

Apósitos dispensables por el Sistema Nacional de Salud



La exclusiva Tecnología 3DFit® proporciona las condiciones para una cicatrización óptima de la herida

Se conforma hasta 2cm al lecho de la herida



Rellena los espacios muertos y ayuda a evitar el acúmulo de exudado

Absorbe verticalmente



Disminuye el riesgo de maceración de los bordes de la herida

Retiene el exudado.



Disminuye el riesgo de fugas de exudado



0%
de acúmulo de exudado¹

0%
de maceración¹



99,9%
de retención de exudado y de bacterias¹

Espumas de silicona

Biatin® Silicone

REF.	C.N	TAMAÑO
33436	492959	12,5x12,5 cm
33437	492934	15x15 cm
33438	492942	17,5x17,5 cm
33405	488114	Sacro 25x25 cm
33408	467159	Multishape 14x19,5 cm



Espumas de silicona con Ag

Biatin® Silicone Ag

REF.	C.N	TAMAÑO
39638	488957	12,5x12,5 cm
39639	497842	15x15 cm



Único apósito con Complejo Zirconio Plata y Tecnología 3DFit. Combate la infección y los biofilms donde importa



Otras espumas sin adhesivo y con adhesivo de hidrocoloide

Biatin® Non-Adhesive

REF.	C.N	TAMAÑO
3410	486472	10x10 cm
3411	489245	10x20 cm
3413	486480	15x15 cm



Biatin® Soft-Hold

REF.	C.N	TAMAÑO
3470	400128	10x10 cm
3472	400129	10x20 cm
3475	400130	15x15 cm



Biatin® Adhesive

REF.	C.N	TAMAÑO
3420	486852	12,5x12,5 cm
3421	486860	15x15 cm



Biatin® Adhesive Max

REF.	C.N	TAMAÑO
3440	488932	12,5x12,5 cm
3443	488940	15x15 cm



Biatin® Adhesive Light

REF.	C.N	TAMAÑO
3433	488965	12,5x12,5 cm



Biatin® Adhesive Sacro

REF.	C.N	TAMAÑO
3483	488973	17x17 cm



Biatin® Adhesive Talón

REF.	C.N	TAMAÑO
3488	489187	19x20 cm



Biatin® Adhesive Contour

REF.	C.N	TAMAÑO
3486	496703	19x20 cm



Otras espumas con Ag

Biatin® Ag Non-Adhesive

REF.	C.N	TAMAÑO
3454	496729	10x10 cm
3455	496737	15x15 cm



Biatin® Ag Adhesive Sacro

REF.	C.N	TAMAÑO
3521	400121	17x17 cm



Biatin® Ag Adhesive Talón

REF.	C.N	TAMAÑO
3523	400122	19x20 cm



Apósitos de hidrocoloide

Comfeel® Plus Transparent

REF.	C.N	TAMAÑO
33533	476697	10x10 cm
33539	467597	15x15 cm
33548	476705	5x25 cm



Comfeel® Plus

REF.	C.N	TAMAÑO
33146	461335	4x6 cm
33110	472597	10x10 cm
33115	472605	15x15 cm



Fibras de hidrocoloide



Biatin® Fiber

REF.	C.N	TAMAÑO
33506	482182	15x15 cm



Atrapa el exudado y bacterias

Mínima retracción

Gelificación altamente cohesiva

Fibras de alginato

Biatin® Alginate

REF.	C.N	TAMAÑO
3710	480681	10x10 cm



Relleno para heridas cavitadas

Fibras de alginato con Ag

Biatin® Alginate Ag

REF.	C.N	TAMAÑO
3765	480699	15x15 cm



Efecto hemostático

Otros productos

Purilon®

REF.	C.N	TAMAÑO
3900	483925	15 gr
3903	485649	25 gr



Physiotulle®

REF.	C.N	TAMAÑO
3912	493502	10x20 cm
3920	493494	15x15 cm



Se puede recortar



Impermeable



Indicado para piel frágil



Antimicrobiano